


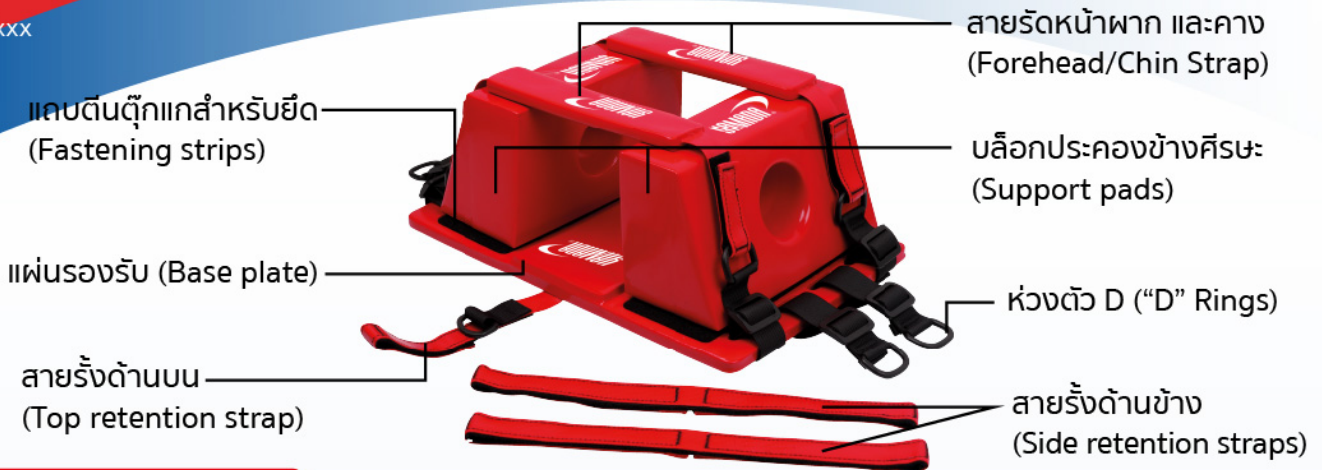

เหมาะสำหรับ / Suitable for

- เป็นอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบล็อกศีรษะและคอของผู้ป่วยให้อยู่นิ่ง สำหรับผู้ชำนาญอย่างน้อย 2 คน ใช้เพื่อการปฐมพยาบาลเท่านั้น
- เป็นพียูและพีวีซีเคลือบด้วยไวนิล กันน้ำและลอยน้ำได้ ออกแบบมาเพื่อไม่รบกวนการทำงานของเครื่อง X-rays, MRI หรือ CT scans
- ประกอบด้วยแผ่นฐานที่มีสายรัด 2 สาย และมีสายรัดหน้าผากและคาง ส่วนประกอบแต่ละชิ้นมีสายรัดและห่วง
- Head immobilizer is an emergency patient-handling device designed to aid in immobilizing a patient's head and neck. It is for professional use only, by a minimum of two trained operators.
- The head immobilizer is vinyl coated, and is both waterproof and buoyant. It is designed not to interfere with medical scanners.
- The head immobilizer includes a base plate with retention straps, two support pads, and two forehead/chin straps. Each component features hook-and-loop fastening strips.

ขั้นตอนการติดตั้งกับกระดานรองหลัง รุ่น YJK-16



1. แยกบล็อกประคองข้างศีรษะออกจากแผ่นรองรับ
1. Separate the components of the head immobilizer.



2. วางแผ่นรองรับที่ด้านบนของกระดานรองหลังสอดสายรัดบริเวณด้านข้างเพื่อยึดกับช่องมือจับและสอดสายรัดบริเวณด้านบน
2. Position the base plate at the head end of the stretcher, thread the side retention straps through the slots.



3. ประกอบบล็อกประคองข้างศีรษะ สายรัดหน้าผากและคาง ดังรูป
3. Completed install head immobilizer with the stretcher as same as the picture

วิธีใช้ / How to use

- ใช้สำหรับงานกู้ภัย
- ใช้ได้ทั้งทางบกและทางน้ำ สามารถลอยน้ำได้ พร้อมผู้ป่วย และนำเข้าเครื่องเอกซเรย์ได้
- Rescue applications
- Used for both onshore and water, float on the water together with patient and through X-ray



วัสดุ (Material)	พียูและพีวีซี เคลือบด้วยไวนิล (PU and PVC, vinyl coat)
ขนาดสินค้า (Size)	40x25.5x15 ซม. (cm)
สี (Color)	แดง (Red)
น้ำหนัก (N.W.)	580 กรัม (g)

ข้อแนะนำ (Suggestion)

- การใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ควรใช้งานอุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น
- Improper use of the head immobilizer can cause injury.
- Use the head immobilizer only for the purpose described in this manual.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย :

บริษัท สยาม โกลบอล กรุป จำกัด ที่อยู่ 85, 87 ซอยอ่อนนุช 64 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-016-6666



คำเตือน (Warning)

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

Notice the warning on the label and accompanying documents before use.

วัสดุ (Material)	ทำจากพลาสติก HDPE
ขนาดสินค้า (Size)	181.9x43.9x4.7 ซม. (cm)
สี (Color)	ส้ม (Orange)
รับน้ำหนัก (Loading)	159 กิโลกรัม (kg)
น้ำหนัก (N.W.)	7.1 กิโลกรัม (kg)



เหมาะสำหรับ (Suitable for)

นำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยได้ อุปกรณ์นี้สามารถลอยน้ำได้พร้อมผู้ป่วย และเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับศูนย์การแพทย์ กระดานรองหลังทำมาจากพลาสติกที่มีความเหนียวสูง น้ำหนักเบา ง่ายสำหรับการจัดเก็บ สามารถผ่านรังสีเอกซเรย์ (X-Ray) ได้โดยไม่ต้องยกผู้ป่วยลงจากแผ่นกระดานรองหลัง

Stretcher is used transportation injury and immobile patients. It can float on water and it is so important for using in the first-aid equipment for medical centers. Stretcher made of high strength engineering plastic, weight loading and easy for storage. More importantly, the structure is allowed X-rays because of its completely translucent.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

- การใช้งานอุปกรณ์ที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ และอันตรายถึงชีวิตได้
- เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก และการใช้งานควรมีผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแล
- Failure to follow these instructions or improper use of this equipment could result in serious injury or death.
- To reduce risk of injury, do not permit children to use this product unless they are closely supervised.

วิธีใช้ (How to use)

- ใช้สำหรับงานกู้ภัย
- ใช้ได้ทั้งทางบกและทางน้ำ สามารถลอยน้ำได้พร้อมผู้ป่วย และนำเข้าเครื่องเอกซเรย์ได้
- Rescue applications.
- Used for both onshore and water, float on the water together with patient and through X-ray.

⚠ คำเตือน (Warning)

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
Notice the warning on the label and accompanying documents before use.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย :

บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด 85, 87 ซอยอ่อนนุช 64 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-016-6666

