

YAMADA

เครื่องหายใจออกซิเจน OXYGEN INHALER

ใบอนุญาตเลขที่ ขพ.1119/2564

MD-1510

64-2-3-2-0000538

คลอว์โฟลมิเตอร์
Flow Meter

วาล์วปรับการไหลของ
ก๊าซออกซิเจน
Flow-control Valves

ข้อต่อหางปลา
9/16-18 UNF RH
Hose Tail Connector

ช่องปล่อย
ก๊าซออกซิเจน
Oxygen Outlet

สายออกซิเจน
Nasal Oxygen Cable
2 เมตร

หน้าปัด 2"
Dial Width 2"

ขนาดเกลียว 1/4" NPT
Thread 1/4" NPT

แกนหัววาล์ว CGA540
Inlet Connector CGA540

กระบอกทำความชื้น
Humidifier Cup

1,850.-/Pc
10 Pcs/Ctn

อุปกรณ์ในกล่อง Package Includes

คุณสมบัติ / Feature

- หน้าปัดอ่านง่าย • ตัวเลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต • ตัวเกจทำมาจากทองเหลืองชุบโครเมียม • สายออกซิเจนทำจาก PVC
- CHROMED GAUGES ARE EASY TO READ. • LENS MADE FROM POLYCARBONATE.
- BODY MACHINED FROM CHROME PLATED BRASS. • NASAL OXYGEN CANNULA MADE FROM PVC.

เหมาะสำหรับ / Suitable for

ใช้ในงานผู้ป่วยที่มีภาวะขาดออกซิเจนรวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เครื่องหายใจสามารถลดความดันอากาศและควบคุมการไหลของออกซิเจนที่เชื่อมต่อกับถังออกซิเจน เพื่อทำให้การไหลของออกซิเจนผ่านสาย PVC เข้าสู่ช่องจมูกผู้ป่วย

APPLIED TO THE TREATMENT OF HYPOXIC DISEASES AND HOME HEALTH CARE. IT CAN DECOMPRESS, STABILIZE AND CONTROL OXYGEN THAT CONNECT AN OXYGEN TANK FOR THE FLOW OF OXYGEN WAS PASSED BY PVC NASAL OXYGEN CANNULA INTO THE PATIENTS NOSTRIL.

คุณสมบัติหลัก / Mainly function

อัตราการไหลของออกซิเจน
Oxygen flow range

0-10
L/Min

ช่วงการปรับลดแรงดัน
reducing range

0.2-0.3
MPA

ช่วงการระบายแรงดันออก
Relief valve pressure range

50.75±7.25
psi

ข้อแนะนำ / Suggestion

- การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายได้
- ควรใช้อุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น
- ควรเปลี่ยนสายยางทุก 5-7 วัน เพื่อนำไปทำความสะอาด
- ควรทำความสะอาดบริเวณช่องจมูกและบริเวณช่องปากทุก 3-4 ชม.
- IMPROPER USING MAY CAUSE THE DANGER.
- SHOULD USE THE ITEM ACCORDING TO PURPOSE WHICH IS SPECIFIED ON THE PACKAGE.
- SHOULD BE CHANGE NASAL OXYGEN CANNULA EVERY 5-7 DAYS FOR WASHING.
- SHOULD BE CLEAN NASOPHARYNX AND ORAL AREA EVERY 3-4 HOURS.

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
WARNING : NOTICE THE WARNINGS ON THE LABEL AND ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE.

Model	MD-1510
Dial Input Range	4000 psi (275.79 bar)
Dial Output Range	fitted
Nominal Flow Rate	15 L/min
Max Input Pressure	200 bar
Normal Range Usage	0.5 bar
Inlet Connection	CGA540
Outlet Connection	9/16 -18UNF
Weight	976 g
Packing	1 Pc

นำเข้าและจัดจำหน่าย : บริษัท สยามเวิลด์ จำกัด เลขที่ 85, 87 ซอยอ่อนนุช 64 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 อีเมล: info@shw.co.th โทร: 02-016-6666 หรือ 062-598-2944

CE ISO9001
NINGBO BEILUN XIAPU
0197 DONGHAI METER FACTORY

วิธีการใช้งาน / APPLIANCE INTRODUCTION



1. จัดเตรียม เช็ควงจรก่อนการประกอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

1. PREPARE AND CHECK THE EQUIPMENT BEFORE THE ASSEMBLY IN THE STATE IS AVAILABLE.



2. เติมน้ำสะอาดลงในกระบอกทำความชื้นให้ระดับน้ำอยู่ระหว่างเส้น (ดังภาพ)

ข้อแนะนำ : ควรเปลี่ยนน้ำสะอาดทุกวัน

2. FILL WATER INTO THE HUMIDIFIER CUP BETWEEN THE LINES (AS SHOWN IN THE PICTURE)

RECOMMENDED : SHOULD BE CHANGE THE WATER EVERYDAY.



3. ประกอบเครื่องหายใจออกซิเจนเข้ากับถังออกซิเจน และใช้ประแจขันให้แน่น

3. ASSEMBLY THE OXYGEN INHALATOR WITH AN OXYGEN TANK AND USE A WRENCH TO TIGHTEN.



4. ต่อสายออกซิเจนเข้ากับกระบอกทำความชื้น

4. CONNECT THE NASAL OXYGEN CANNULA TO THE HUMIDIFIER CUP.



5. เปิดวาล์วที่ตัวถัง แล้วจึงปรับระดับการไหลของออกซิเจน ให้ลูกกลิ้งอยู่ในระดับ

5. OPEN THE VALVE ON THE OXYGEN TANK AND ADJUST THE FLOW OF OXYGEN TO THE LEVEL.



6. สวมสายออกซิเจน เข้ากับจมูกผู้ป่วย

ข้อแนะนำ : ควรปรับให้กระชับกับใบหน้า

6. WEAR THE NASAL OXYGEN CANNULA INTO THE PATIENTS NOSTRIL. (RECOMMENDED : SHOULD BE ADAPTED TO FIT WITH THE FACE.)

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน “เครื่องหายใจออกซิเจน” / ATTENTION POINT

- ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน สะอาดและแห้ง
- ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบี เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- รักษาความสะอาดของกระบอกทำความชื้นอย่างสม่ำเสมอ
- หลังจากการใช้งานให้ปิดสวิทช์ที่ถังออกซิเจน ไล่ออกซิเจนที่เหลือออกจากท่อ ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนให้อยู่ในระดับ 0 (ศูนย์) แล้วจึงปิดวาล์วของตัวถังออกซิเจน หากต้องการใช้งานอีก ให้เปิดวาล์วถังออกซิเจนก่อนแล้วจึงหมุนปรับอัตราการไหลของออกซิเจนเพื่อป้องกันการระเบิด
- เก็บให้พ้นแสง หลีกเลี่ยงอุณหภูมิและความชื้นสูง เก็บไว้ในที่แห้ง
- ไม่ควรใช้หากบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดหรือเกิดความเสียหาย
- สายออกซิเจนควรใช้งานครั้งเดียว และทิ้งหลังการใช้งาน

- BEFORE USING THE SUCTION, CHECK ALL PARTS BAD OR GOOD AND CLEAN IT BY DRYING CLOTH.
- DO NOT USE LUBRICANTS OR GREASES. OTHERWISE IT WILL CAUSE AN EXPLOSION.
- CLEAR WATER IN MOISTURE BOTTLE KEEPS CLEAN.
- AFTER USING SUCTION, PUT OFF THE OXYGEN TUBE SWITCH, MAKE REST OXYGEN OUT, PRESSURE GAGE TO ZERO SITE, LAST PUT OFF FLOW SWITCH IF USING AGAIN, FIRST PUT ON THE OXYGEN TUBE SWITCH, AVOID EXPLODING.
- DO NOT STORE IN DIRECT SUNLIGHT, AT EXTREME TEMPERATURES OR IN HIGH HUMIDITY. STORE IN DRY CONDITIONS.
- DO NOT USE IF PACKAGE IS OPEN OR DAMAGED.
- NASAL OXYGEN CANNULA CAN USE ONLY ONCE AND THROWN AWAY.

วิธีการสวมสายออกซิเจน / HOW TO WEAR OXYGEN TUBE



1. จับสายออกซิเจนให้อยู่ในตำแหน่งโดยปลายโค้งงอเข้าหาผู้ป่วย

Hold nasal cannula in proper position with prongs curving downward.



2. สอดปลายโค้งงอเข้าไปในจมูก

Place cannula prongs into nose.



3. นำสายออกซิเจนอ้อมขึ้นไปเหนือหู

Wrap tubing over and behind ears.



4. ปรับสายออกซิเจนให้กระชับโดยการเลื่อนพลาสติกด้านล่างคาง

Adjust plastic slide under chin until cannula fits snugly.

กระบอกทำความชื้น
Humidifier Cup



200.-/Pc
XX Pcs/Ctn