

YAMADA

ขพ.744/2565

BACK SUPPORT BELT เข็มขัดพยุงหลัง

MODEL :
Y001

ใบรับจดแจ้งที่ 65-2-3-2-0001865

- ช่วยพยุงกล้ามเนื้อหลังด้านล่าง
- บรรเทาอาการปวดหลังจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน
- SUPPORTING YOUR LOWER BACK.
- RELIEVE BACK PAIN FROM PROLONGED SITTING.

แกนพยุงหลัง 6 แกน ทำจากโพลีโพรพิลีน



ผ้ายางยืดชั้นในและชั้นนอก ผลิตจากโพลีเอสเตอร์

การเก็บรักษา : จัดเก็บในพื้นที่แห้งและหลีกเลี่ยงแสงแดด
STORAGE : KEEP IT IN DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.



ขนาดเข็มขัดพยุงหลัง BACK SUPPORT BELT SIZE

SIZE	WAISTLINE	WEIGHT
S	20"-26"	460 g
M	26"-32"	464 g
L	32"-38"	490 g
XL	38"-44"	540 g
XXL	44"-50"	650 g

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเอดดิวัลด์ จำกัด
253/1038 ซอยเคระห์เมสสา 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-016-6666

โรงงานได้รับการรับรอง : ISO13485

ผลิตโดย : บริษัท ซื่อเจียจวง ออโพลี เมดิสล ติวซ์ จำกัด
ตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ในชั้นที่ 4 ในเลขที่ 202 ของกรี ซัพพอร์ตติง อินดิสทริเรียล ของเลขที่ 389
ถนนกังซาน โอ-เทคโซน ซื่อเจียจวง เหวอเป่ย์ ประเทศจีน

Manufacturer : SHIJIAZHANG AOFETE MEDICAL DEVICE CO.,LTD.
East and southeast side in the fourth floor in the NO.202 of gree supporting industrial of NO.389 hengshan
street high-tech zone Shijiazhuang, Hebei, China.



ขพ.744/2565

BACK SUPPORT BELT เข็มขัดพยุงหลัง

MODEL :
Y001

ใบรับจดแจ้งที่ 65-2-3-2-0001865

สายคล้องบ่ากว้าง 1½ นิ้ว ปรับสั้นยาวได้

SHOULDER STRAPS IS 1½ INCH WHICH CAN BE ADJUSTED.

แถบสะท้อนแสงเมื่อใช้งานในเวลากลางคืน

REFLECTIVE STRIPS TO ENSURE THE ALL THE WAY THROUGH THE NIGHT.



แกนพยุงหลังด้านใน 6 แกนทำจากโพลีโพรพิลีน

SIX BACK SUPPORT AXES MADE BY POLYPROPYLENE.



ผ้าภายในและชั้นนอกผลิตจากโพลีเอสเตอร์

THE INNER AND OUTER ELASTIC CLOTH ARE MADE FROM POLYESTER.



วิธีการใช้งาน (HOW TO USE)



- สอดแขนทั้ง 2 ข้างผ่านสายคล้องไหล่ ให้แผ่นรองหลังอยู่ด้านหลัง
- ติดแผ่นรองหลังเข้าหากันให้กระชับกับเอว
- ติดแผ่นเสริมความกระชับที่อยู่ชั้นนอกสุด เพื่อเพิ่มความกระชับมากขึ้น
- ปรับสายคล้องไหล่ให้กระชับพอดี ไม่อึดอัด

- SLIP THE BACK ON BY PASS BOTH OF YOUR ARMS THROUGH THE SHOULDER STRAPS AND KEEP BACKPLATE AT THE BACK
- FASTEN OUTER ELASTIC BANDS AT YOUR SIDE.
- GRASP THE OUTER BANDS AND STRETCH FORWARD.
- SECURE BANDS IN A COMFORTABLE POSITION.

ข้อแนะนำ (SUGGESTION)

ควรเลือกสวมใส่เข็มขัดพยุงหลังให้
เหมาะสมขนาดรูปร่างผู้สวมใส่

CHOOSE THE BACK SUPPORT BELT, WHICH
IS APPROPRIATE AND FIT TO YOUR SIZE.

คำเตือน (WARNING)

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ
เครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

NOTICE THE WARNING ON THE LABEL AND
ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเอดิวิซ จำกัด
253/1038 ซอยเค-ระมเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-016-6666

โรงงานได้รับการรับรอง : ISO13485

ผลิตโดย : บริษัท ชีวจิวจวง ออฟฟิศ เทคโนโลยี จำกัด
ตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ในชั้นที่ 4 ในเลขที่ 202 ของถนน ชีพพอร์ตติง อินดิสทริคัล ของเลขที่ 389
ถนนหิงซาน โอ-เทคโซน ชีวจิวจวง เหม่ย์ ประเทศจีน

Manufacturer : SHIJIAZHUANG AOFETE MEDICAL DEVICE CO.,LTD.
East and southeast side in the fourth floor in the NO.202 of gree supporting industrial of NO.389 hengshan
street high-tech zone Shijiazhuang, Hebei, China.