



- รูปทรงโค้งเพื่อรองรับใบหน้าและสามารถยึดติดได้กับหน้ากาก
- สร้างพื้นที่เพื่อให้ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกขึ้น
- ลดการเกิดไอน้ำเกาะแว่นหรือทำให้แว่นเป็นฝ้า

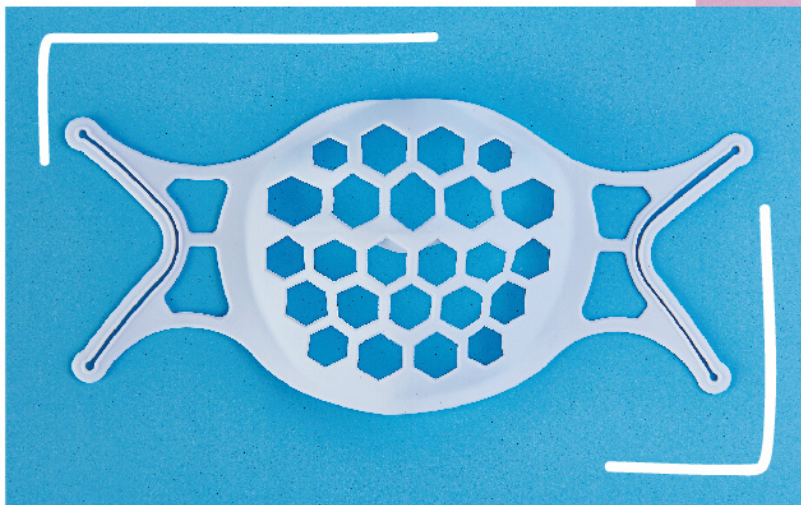

- วัสดุ PE น้ำหนักเบา คงรูปทรง ยืดหยุ่น แข็งแรง
- สามารถใช้งานได้หลายครั้ง ทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่

15.-/Pc

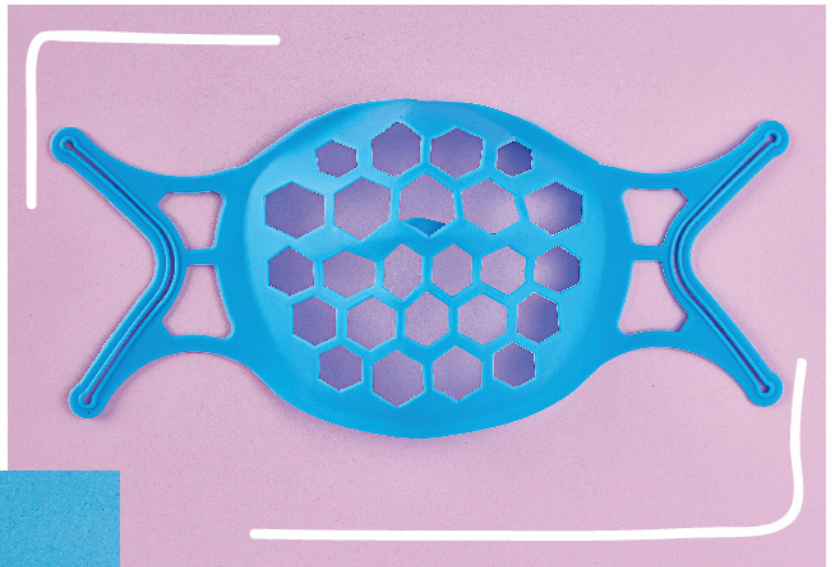

วิธีใช้

- ล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสโครงหน้ากา
- สอดสายที่ยาวของหน้ากากเข้าไปในด้านข้างของโครงหน้ากา ทั้ง 2 ด้าน
- จัดโครงหน้ากาและหน้ากากให้เข้าที่
- สวมหน้ากากในตำแหน่งที่พอดี

◦ Wash your hands to ensure the hygiene of them before touching the bracket. ◦ Put the mask loops through the ear hooks of the bracket on both sides from outside to inside. ◦ Adjust the position of the bracket pull mask loops as far as getting the ear hooks of the bracket clipped on to the cloth of masks. ◦ Let the bracket be on a certain comfortable position and put on the mask.

ข้อมูลสินค้า

สี :  
วัสดุ : PE
ขนาด : 18 x 8.5 x 5.5 cm
บรรจุ : 1 pc/pack



คำแนะนำ (Suggestion)

- โปรดทำความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน สินค้าสามารถใช้งานได้หลายครั้ง
- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล ไม่ควรใช้ร่วมกันมากกว่าหนึ่งคน
- Please clean before and after use, can be reused.
- The good is personal items do not share with others.

คำเตือน (Warning)

อุปกรณ์นี้ช่วยปกป้องดวงตาและใบหน้าเท่านั้น หากใช้ในทางที่ผิดหรือไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง รวมถึงส่งผลให้ตาบอดหรือเสียชีวิตได้


These eye and face protection products help provide limited eye and face protection. Misuse or failure to follow warnings and instructions may result in serious potential injury, including blindness or death.

USED TOGETHER WITH A MASK.
INCREASE EFFICIENCY TO PREVENT DUST.

ใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัย
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันฝุ่น



*สินค้าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่ควรใช้ซ้ำ
(Single Used)

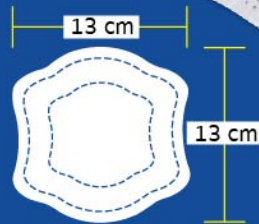

500.-/BOX
40 Pcs/Box

เหมาะสำหรับ / SUITABLE FOR

ใช้รองเสริมหน้ากากอนามัยต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นของหน้ากากอนามัย
Used as a supplement to masks. To increase efficiency in the prevention of dust.

คุณสมบัติ / FEATURE

- สามารถกันน้ำได้ ไม่ซึมผ่านแผ่นรองไปยังหน้ากากอนามัย
- มีแถบกาวยึดเพื่อแปะติดกับหน้ากากอนามัย ป้องกันแผ่นรองหลุด เลื่อน จากหน้ากาก
- Can be waterproof does not penetrate through the pads.
- With adhesive tape to attach to the mask prevents the pads from sliding off from the mask.

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- หน้ากากป้องกัน ต้องใช้แผ่นป้องกันร่วมกับหน้ากาก เมื่อใช้หน้ากากสามารถใส่หน้ากากเพื่อกรองฝุ่น หมอกควัน ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานหน้ากาก
- แนะนำให้เปลี่ยนทุก 24 ชั่วโมง
- ไม่ควรใช้ซ้ำ
- Protective mask Must use protective sheet together with mask When using a mask, you can wear a mask to filter dust, haze. Helps to increase the lifetime of the mask.
- Suggest to change every 24 hours
- Should not be used repeatedly

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE

กางแผ่นรองหน้ากากอนามัยออก



แกะเทปกาวทั้งสองด้าน



นำด้านที่มีกาวยึดแปะด้านในหน้ากาก



จัดแผ่นรองให้เข้าทรงหน้ากาก



สวมใส่ให้พอดีกับใบหน้าอย่างถูกต้อง



สามารถใช้กับหน้ากากอนามัยได้หลายแบบ



ยืดหยุ่น สวมใส่สบาย ผิวสัมผัสนุ่ม



3D
กระชับใบหน้า
หายใจสะดวก



สามารถ
ซักได้
WASHED
& REUSED



ฝุ่น
DUST



เกสร
ดอกไม้
POLLEN


160 Packs/Ctn

3 PCS / PACK

คุณสมบัติ / FEATURE

- รูปทรง 3 มิติ กระชับใบหน้า
- ผลิตจากวัสดุโพลีเอสเตอร์
- สามารถกรองฝุ่นเกสรดอกไม้
- สามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้
- 3D WEARING FIT THE FACE CURVE, EASY TO BREATHING.
- MADE FROM POLYESTER SPONGE, LIGHT AND SOFT, COMFORTABLE TO WEAR.
- PROTECT POLLEN-ALLERGIES AND EFFECTIVELY BLOCKING DUSTS.
- CAN BE WASHED AND REUSED.

วิธีสวมใส่ / HOW TO USE

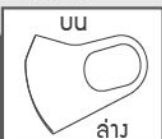

- 1 ตรวจสอบด้านบนและด้านล่างก่อน
สวมใส่ให้ถูกต้อง
CONFIRM THE CORRECT TOP AND BOTTOM
EDGES, THEN EXPAND LEFT AND RIGHT.



- 2 ใช้มือเกี่ยวสายที่หูทั้งสองข้าง
PICK UP BOTH END, HANG IT ON THE EAR.




- 3 จัดหน้ากากให้เข้ากับใบหน้า
GENTLY PRESS THE MASK TO ATTACH IT
TO THE CHEEK.

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- ห้ามใช้หน้ากากกับผู้ที่มิมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- หากพบสิ่งผิดปกติบนผิวหนังควรหยุดใช้งานทันที
- ไม่ควรเก็บหน้ากากบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดหรือแดดส่องถึงเนื่องจาก
ลักษณะของโพลีเอสเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงของสีหน้ากาก แต่ไม่มี
ปัญหาต่อคุณภาพสินค้า
- สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่
- DO NOT USE THE MASK ON PEOPLE WITH RESPIRATORY PROBLEM.
- IF THERE ARE ABNORMALITIES ON THE SKIN, SHOULD STOP USING IMMEDIATELY.
- DO NOT KEEP THE MASK IN HIGH TEMPERATURE, OR SUNSHINY PLACE DUE TO THE
TYPE OF POLYESTER, THE MASK MAY CHANGE COLOR BUT NO PROBLEM WITH
PRODUCT QUALITY.
- CAN BE CLEANED WITH SOAP.

WARNING

หน้ากากไม่สามารถป้องกันควันพิษ หรือก๊าซที่เป็นอันตราย
THE MASK CAN NOT PREVENT TOXIC FUMES OR HARMFUL GAS.

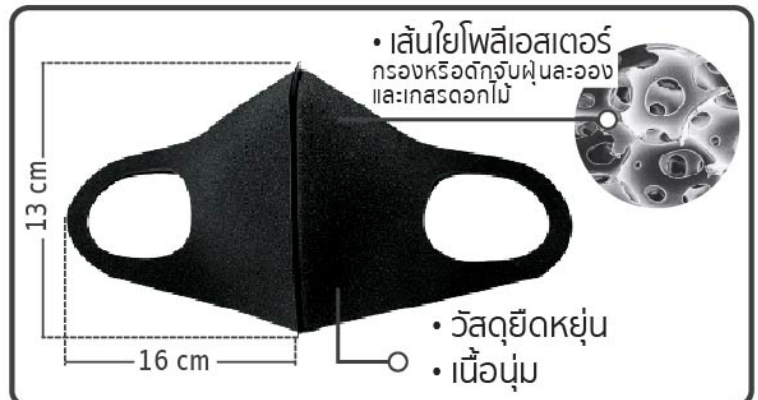




สำหรับ
วัยที่อายุ 7-14 ปี
YEARS

ป้องกันฝุ่น และ เกสรดอกไม้

PREVENT
PARTICLE
AND POLLEN.



ขนาดหน้ากากอนามัย

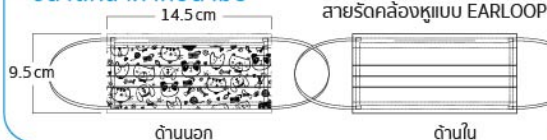

สายรัดแบบ
คล้องหู



รุ่น (Model)

แพ็คเกจ (Pack)
ชิ้น (pc)

บรรจุต่อกล่อง (Box)
ชิ้น (pc) แพ็คเกจ (pack)

บรรจุต่อลัง (Carton)
ชิ้น (pc) แพ็คเกจ (pack) กล่อง (Box)

น้ำหนัก (Weight)

3030 TEEN (5 ชิ้น)

5

50

10

2000

400

40

18.5 g/Pack

3030 TEEN (50 ชิ้น)

-

50

-

2000

-

40


180 g/Box

คุณสมบัติ / FEATURE


• ฟิลเตอร์การกรองมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเกสรดอกไม้ • น้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก • สายรัดคล้องหู Latex free ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง • ไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

• HIGH PERFORMANCE FILTERING AGAINST PARTICLES AND POLLEN. • LIGHTWEIGHT AND BREATHE EASY. • LATEX FREE EAR LOOP MASK WILL NOT IRRITATE SKIN. • NON - MEDICAL.

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE

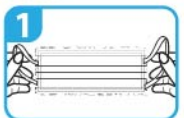

1. ล้างมือให้สะอาดและแกะหน้ากากออกจากถุง ตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาด เป็นรู หรือไหม้
WASH YOUR HANDS AND REMOVE THE MASK FROM PLASTIC BAG AND CHECKING FOR TEAR OR HOLE.

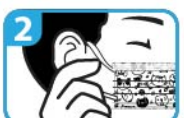

2. สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปาก หันด้านที่มีลวดลายออกด้านนอก คล้องสายที่หูทั้งสองข้าง
WEAR THE MASK COVER YOUR NOSE AND MOUTH. TURN THE MASK WITH BLUE COLOR ON THE OUTSIDE AND PUT THE WHITE COLOR FIT TO FACE AND BOTH EARLOOP.



3. ปรับโครงเหล็กให้รัดกับดั้งจมูกและแนบชิดใบหน้า
ADJUST ALUMINUM STRIP TO FIT YOUR NOSE. UNFOLD THE MASK TO COVER MOUTH AND CHIN.

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

• เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
• CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.


คำเตือน / WARNING

• ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
• ไม่ควรใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
• เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
• ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากกันแก๊ส)
• ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ
• DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
• SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
• CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE.
• CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.
• SINGLE USE.

ป้องกันฝุ่นและเกสรดอกไม้

PREVENT PARTICLE AND POLLEN.

ขนาดหน้ากากอนามัย

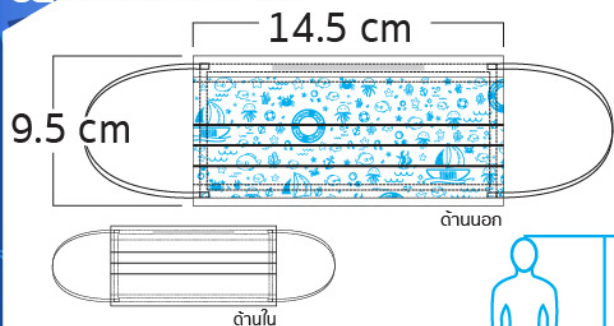

อายุ 7-14 ปี แนะนำสำหรับ
ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
ตามมาตรฐาน

สูงไม่เกิน 165 ซม.



สายรัดแบบ
คล้องหู




รุ่น (Model)	แพ็คเกจ (Pack)		บรรจุต่อกล่อง (Box)		บรรจุต่อลัง (Carton)			น้ำหนัก (Weight)
	ชิ้น (pc)		ชิ้น (pc)	แพ็คเกจ (pack)	ชิ้น (pc)	แพ็คเกจ (pack)	กล่อง (Box)	
3030 TEEN (50 ชิ้น)	-		50	-	2000	-	40	180 g/Box

คุณสมบัติ / FEATURE

• ฟิลเตอร์การกรองมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเกสรดอกไม้ • น้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก • สายรัดคล้องหู Latex free ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

• HIGH PERFORMANCE FILTERING AGAINST PARTICLES AND POLLEN.
• LIGHTWEIGHT AND BREATHE EASY. • LATEX FREE EARLOOP MASK WILL NOT IRRITATE SKIN.

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE

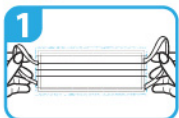

1. ล้างมือให้สะอาดและแกะหน้ากากออกจากถุง ตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาด เป็นรู หรือไหม้
WASH YOUR HANDS AND REMOVE THE MASK FROM PLASTIC BAG AND CHECKING FOR TEAR OR HOLE.



2. สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปาก หันด้านที่มีลวดลายออกด้านนอก คล้องสายที่หูทั้งสองข้าง
WEAR THE MASK COVER YOUR NOSE AND MOUTH. TURN THE MASK WITH BLUE COLOR ON THE OUTSIDE AND PUT THE WHITE COLOR FIT TO FACE AND BOTH EARLOOP.



3. ปรับโครงเหล็กให้รัดกับดั้งจมูกและแบบชิดใบหน้า
ADJUST ALUMINUM STRIP TO FIT YOUR NOSE. UNFOLD THE MASK TO COVER MOUTH AND CHIN.

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- หน้ากากอนามัยเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ
- SINGLE USE.

คำเตือน / WARNING

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
- ไม่ควรใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
- ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากกันแก๊ส)
- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
- SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE.
- CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.

ป้องกันฝุ่น และ เกสรดอกไม้

PREVENT PARTICLE AND POLLEN.




ฝุ่น

PARTICLE



เกสรดอกไม้

POLLEN

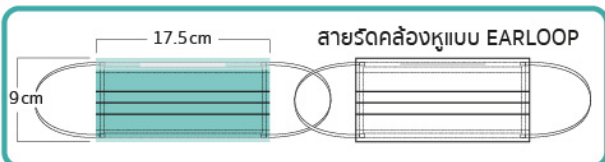

สายรัดคล้องหูแบบ EARLOOP


จำนวน (QTY)	แพ็ค (Pack)		บรรจุต่อกล่อง (Box)		บรรจุต่อลัง (Carton)			น้ำหนัก (Weight)
	ชิ้น (pc)		ชิ้น (pc)	แพ็ค (pack)	ชิ้น (pc)	แพ็ค (pack)	กล่อง (Box)	
2 ชิ้น	2		50	25	2000	1000	40	5 g/Pack
5 ชิ้น	5		50	10	2000	400	40	12.95 g/Pack

คุณสมบัติ / FEATURE

• ฟิลเตอร์การกรองมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเกสรดอกไม้ • น้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก • สายรัดคล้องหู Latex free ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

• HIGH PERFORMANCE FILTERING AGAINST PARTICLES AND POLLEN. • LIGHTWEIGHT AND BREATHE EASY. • LATEX FREE EAR LOOP MASK WILL NOT IRRITATE SKIN.

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE

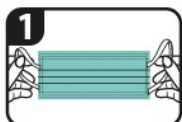

1. ล้างมือให้สะอาดและแกะหน้ากากออกจากถุง ตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาด เป็นรู หรือไหม้

WASH YOUR HANDS AND REMOVE THE MASK FROM PLASTIC BAG AND CHECKING FOR TEAR OR HOLE.



2. สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปาก หันด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอก คล้องสายที่หูทั้งสองข้าง

WEAR THE MASK COVER YOUR NOSE AND MOUTH. TURN THE MASK WITH BLUE COLOR ON THE OUTSIDE AND PUT THE WHITE COLOR FIT TO FACE AND BOTH EARLOOP.



3. ปรับโครงเหล็กให้รัดกับดั้งจมูกและแนบชิดใบหน้า

ADJUST ALUMINUM STRIP TO FIT YOUR NOSE. UNFOLD THE MASK TO COVER MOUTH AND CHIN.

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

• เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
• CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.

คำเตือน / WARNING

• ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
• ไม่ควรใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
• เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
• ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากกันแก๊ส)
• ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ
• DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
• SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
• CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE.
• CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.
• SINGLE USE.



STANDARD
T/GDBX 025-2020
Certified with CNAS

หน้ากากอนามัย
4PLY DISPOSABLE FACE MASK

MODEL 3030

SUPER BLACK

ซูเปอร์แบล็ค



สายรัดแบบ
คล้องหู

ป้องกันฝุ่นและ
เกสรดอกไม้

WEAR FOR PROTECT PARTICLE AND POLLEN.




ฝุ่น PARTICLE



เกสรดอกไม้ POLLEN

ขนาดหน้ากากอนามัย

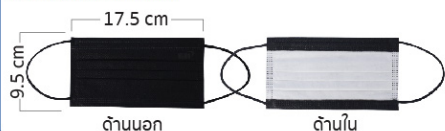


จำนวน (QTY)	แพ็คเกจ (Pack) ชิ้น (pc)	บรรจุต่อกล่อง (Box) ชิ้น (pc) แพ็คเกจ (pack)	บรรจุต่อลัง (Carton) ชิ้น (pc) แพ็คเกจ (pack) กล่อง (Box)	น้ำหนัก (Weight)
5 ชิ้น	5	50 10	2000 400 40	19.5 g/Pack
50 ชิ้น	-	50 -	2000 - 40	265 g/Box

คุณสมบัติ / FEATURE

- ฟิลเตอร์การกรองมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเกสรดอกไม้
- น้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก
- สายรัดคล้องหู Latex free ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- HIGH PERFORMANCE FILTERING AGAINST PARTICLES AND POLLEN.
- LIGHTWEIGHT AND BREATHE EASY.
- LATEX FREE EAR LOOP MASK WILL NOT IRRITATE SKIN.

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE

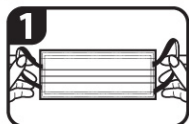

1. ล้างมือให้สะอาดและแกะหน้ากากออกจากถุง ตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาด เป็นรู หรือไม่
WASH YOUR HANDS AND REMOVE THE MASK FROM PLASTIC BAG AND CHECKING FOR TEAR OR HOLE.



2. สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปาก หันด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอก คล้องสายที่หูทั้งสองข้าง
WEAR THE MASK COVER YOUR NOSE AND MOUTH. TURN THE MASK WITH BLUE COLOR ON THE OUTSIDE AND PUT THE WHITE COLOR FIT TO FACE AND BOTH EARLOOP.



3. ปรับโครงเหล็กให้รัดกับดั้งจมูกและแนบชิดใบหน้า
ADJUST ALUMINUM STRIP TO FIT YOUR NOSE. UNFOLD THE MASK TO COVER MOUTH AND CHIN.

ข้อแนะนำ / SUGGESTION


- เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
- CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.

ส่วนประกอบ / COMPONENTS

การป้องกัน 4 ชั้น (4 LAYERS PROTECTION)

Outer Layer ฟ้าใยสังเคราะห์
แบบไม่ทอ กันละอองน้ำ
Polypropylene non-woven
fabric. (25 g)

Second Layer
ฟ้าใยสังเคราะห์แบบไม่ทอ
กันละอองน้ำ Polypropylene
non-woven fabric. (25 g)

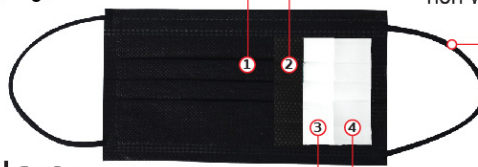

Third Layer
ชั้นกรองเมลต์โบลน
กรองฝุ่น ขนาดอนุภาค
0.1 ไมครอน ≥ 99%
Meltblown filter, PFE ≥ 99%. (25 g)

Inner Layer
ฟ้าใยสังเคราะห์แบบไม่ทอ
กันละอองน้ำ
Polypropylene non-woven
fabric. (25 g)

คำเตือน / WARNING

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
- ไม่ควรใช้ในช่วงที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหายหรือรู้สึกหายใจติดขัด
- ไม่สามารถใช้ซ้ำป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากแก๊ส)
- ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ
- ควรใช้หน้ากากอนามัยโดยบุคคลคนเดียวเท่านั้น และไม่ควรร่วมกับคนอื่น

- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
- SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE.
- CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.
- SINGLE USE.
- THE MASK MUST BE REGULATED TO USE BY A PERSON ONLY, DO NOT SHARE WITH OTHERS.



หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
DISPOSABLE MEDICAL MASK

MODEL **3031**

ใบรับจดแจ้งที่ 65-2-3-2-0001057

EN 14683:2019+AC:2019 TYPE IIR

BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY (BFE) > 99%


MICROBIAL CLEANLINESS ≤30 CFU/g

DIFFERENTIAL PRESSURE <60 Pa/cm²

SPLASH RESISTANCE PRESSURE ≥16.0 kPa

PARTICLE FILTRATION EFFICIENCY (PFE) > 99%

VIRAL FILTRATION EFFICIENCY (VFE) > 99%

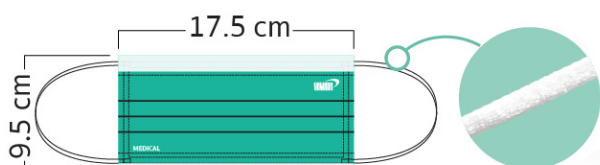

3 LAYERS PROTECTION

OUTER LAYER

NON-WOVEN FABRIC

ผ้าใยสังเคราะห์แบบไม่ทอ

MIDDLE LAYER

MELTBLOWN FILTER

ชั้นกรองเมลด์โบล

INNER LAYER

NON-WOVEN NANO ANTI-BACTERIAL FABRIC

ผ้านาโนยับยั้งแบคทีเรีย

รุ่น (MODEL)	สี (COLOR)	ขนาด (SIZE)	จำนวนบรรจุ (PACKING)
3031	สีเขียว	17.5x9.5 cm	50 ชิ้น : กล่อง
3031	สีขาว	17.5x9.5 cm	50 ชิ้น : กล่อง
3031	สีชมพู	17.5x9.5 cm	50 ชิ้น : กล่อง





หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
DISPOSABLE MEDICAL MASK

MODEL 3031

ใบรับจดแจ้งที่ 65-2-3-2-0001057



เนื้อผ้าชั้นในยับยั้งแบคทีเรีย
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS

คุณสมบัติ / FEATURE

- สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ขนาดอนุภาค 3.0 ± 0.3 ไมครอน $> 99\%$
- กรองฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กขนาดอนุภาค 0.1 ไมครอน $> 99\%$
- สามารถป้องกันสารคัดหลั่งและการกระเด็นของเลือดตาม CLASSIFICATION TYPE IIR
- THE FILTRATION MEDIA CAN FILTER BACTERIA AND VIRUS AT PARTICLE SIZE 3.0 ± 0.3 MICRONS $> 99\%$
- DUST FILTRATION AND TINY PARTICLES AT PARTICLE SIZE 0.1 MICRONS $> 99\%$
- CAN SECRETION RESISTANCE AND SPATTER OF BLOOD TO MEET TYPE IIR CLASSIFICATION

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- เปลี่ยนหน้ากากทันทีเมื่อชำรุดหรือรู้สึกหายใจติดขัด
- หน้ากากเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ห้ามใช้ซ้ำ
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE.
- DO NOT REUSE.

การเก็บรักษา / STORAGE


จัดเก็บในพื้นที่แห้งและหลีกเลี่ยงแสงแดด
KEEP DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.

คำเตือน / WARNING

- ไม่สามารถใช้ในการป้องกันก๊าซพิษ
- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
- DO NOT USE FOR GASES OR VAPOURS.
- NOTICE THE WARNINGS ON THE LABEL AND ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE.



กรองเชื้อแบคทีเรีย
BFE $> 99\%$
FILTRATION FOR $3.0 \pm 0.3 \mu\text{m}$

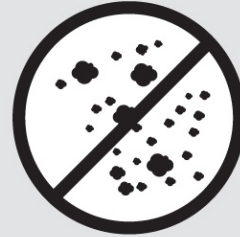

กรองฝุ่นละออง
PFE $> 99\%$
FILTRATION FOR 0.1 MICRONS




กรองเชื้อไวรัส
VFE $> 99\%$
FILTRATION FOR $3.0 \pm 0.3 \mu\text{m}$



ป้องกันสารคัดหลั่ง
SPLASH RESISTANCE PRESSURE
TEST PRESSURE AT 16.0 kPa

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE

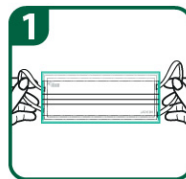

- สวมหน้ากากให้คลุมจมูก ปาก และคาง โดยหันด้านสีเข้มออกด้านนอก
- WEAR THE MASK COVER ALL NOSE, MOUTH AND CHIN. ENSURE THAT THE COLORED SIDE IS OUT.



- คล้องสายรัดกับหูให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
- PUT THE EARLOOP IN PROPER POSITION.



- กดลวดบริเวณขอบบนของหน้ากากให้แนบชิดกับสันจมูก
- PRESS THE STEEL WIRE TO FIT WITH NOSE.


หน้ากากอนามัย KIDS & TEEN

3D MASK MODEL 3033

ป้องกันฝุ่น และ เกสรดอกไม้
PREVENT PARTICLE AND POLLEN.



ขนาดหน้ากากอนามัย

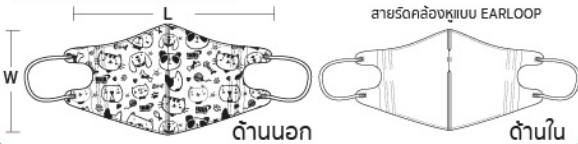



รุ่น (Model)	ขนาด (Size)	แพ็คเกจ (Pack) ชิ้น (pc)	บรรจุต่อถุง (Bag) ชิ้น (pc) แพ็คเกจ (pack)	บรรจุต่อลัง (Carton) ชิ้น (pc) แพ็คเกจ (pack) ถุง (Bag)	น้ำหนัก (Weight) ต่อชิ้น (pc)
KIDS 3-7 ปี	S (13.5x9.5cm)	5	60 12	1200 240 20	6 g
TEEN 7-14 ปี	M (15.5x11.5cm)	5	60 12	1200 240 20	8 g

คุณสมบัติ / FEATURE

- ฟิลเตอร์การกรองมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเกสรดอกไม้
- น้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก
- สายรัดคล้องหู Latex free ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์
- HIGH PERFORMANCE FILTERING AGAINST PARTICLES AND POLLEN.
- LIGHTWEIGHT AND BREATHE EASY.
- LATEX FREE EAR LOOP MASK WILL NOT IRRITATE SKIN.
- NON - MEDICAL.

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE

- ล้างมือให้สะอาด แกะหน้ากากออกจากถุงตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาด เป็นรู หรือไม่
- คลี่หน้ากาก ปรับทรงให้คลุมปากและคาง คล้องสายที่หูทั้งสองข้าง
- WASH YOUR HANDS AND REMOVE THE MASK FROM PLASTIC BAG AND CHECKING FOR TEAR OR HOLE.
- UNFOLD THE MASK AND ADJUST SHAPE TO COVER MOUTH AND CHIN. FIT YOUR FACE AND STRAP ON BOTH EARS.

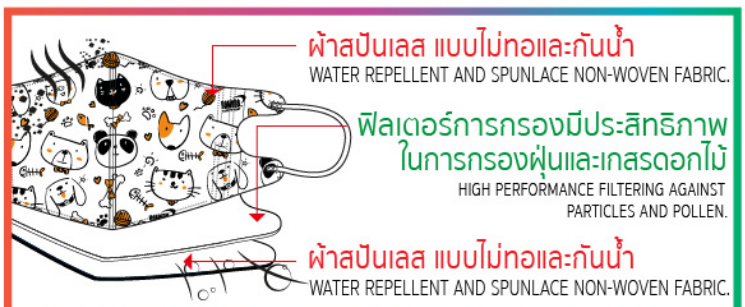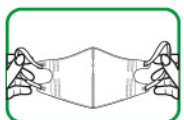

ข้อแนะนำ / SUGGESTION


- เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
- CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.

คำเตือน / WARNING

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
- ไม่ควรใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
- ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากกันแก๊ส)
- ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ
- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
- SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE.
- CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.
- SINGLE USE.

ป้องกันฝุ่น กลิ่น ควันท่อไอเสีย มลพิษในอากาศ


PREVENT PARTICLE, ODORS
EXHAUST FUMES
AND AIR POLLUTION.

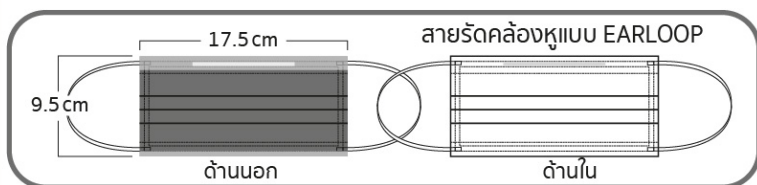


จำนวน (QTY)	แพ็คเกจ (Pack) ชิ้น (pc)	บรรจุต่อกล่อง (Box) ชิ้น (pc) แพ็คเกจ (pack)	บรรจุต่อลัง (Carton) ชิ้น (pc) แพ็คเกจ (pack) กล่อง (Box)	น้ำหนัก (Weight)
5 ชิ้น	5	50 10	2000 400 40	18.5 g/Pack

คุณสมบัติ / FEATURE

- ฟิลเตอร์การกรองมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเกสรดอกไม้ • น้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก • สายรัดคล้องหู Latex free ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง • ไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
- HIGH PERFORMANCE FILTERING AGAINST PARTICLES AND POLLEN.
- LIGHTWEIGHT AND BREATHE EASY. • LATEX FREE EAR LOOP MASK WILL NOT IRRITATE SKIN. • NON - MEDICAL.

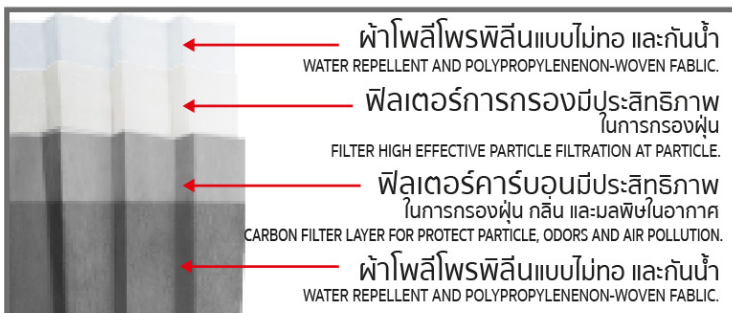


วิธีการใช้งาน / HOW TO USE

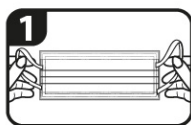

1. ล้างมือให้สะอาดและแกะหน้ากากออกจากถุง ตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาด เป็นรู หรือไม่
WASH YOUR HANDS AND REMOVE THE MASK FROM PLASTIC BAG AND CHECKING FOR TEAR OR HOLE.



2. สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปาก หันด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอก คล้องสายที่หูทั้งสองข้าง
WEAR THE MASK COVER YOUR NOSE AND MOUTH. TURN THE MASK WITH BLUE COLOR ON THE OUTSIDE AND PUT THE WHITE COLOR FIT TO FACE AND BOTH EARLOOP.

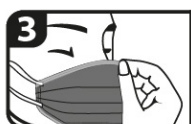

3. ปรับโครงเหล็กให้รัดกับดั้งจมูกและแบบชิดใบหน้า
ADJUST ALUMINUM STRIP TO FIT YOUR NOSE. UNFOLD THE MASK TO COVER MOUTH AND CHIN.

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
- CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.

คำเตือน / WARNING

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
- ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE.
- ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากแก๊ส)
- CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.
- ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ
- SINGLE USE.



STANDARD
T/GDBX 025-2020

หน้ากากอนามัย DISPOSABLE FACE MASK

3Dfit 4230
สำหรับเด็ก Kids



ป้องกันฝุ่น
PM 2.5

Particle



ป้องกัน
เกสรดอกไม้
Pollen



หน้ากากอนามัย
ปกป้อง 4 ชั้น
4 Layers

ประสิทธิภาพการกรอง
FILTRATION EFFICIENCY $\geq 99\%$



เนื้อผ้านาโนอ่อนโยน
ไม่ระคายเคืองต่อผิว
Nano Fabric

• รูปทรง 3D ออกแบบให้รับกับส่วนโค้งของ
ใบหน้า สวมใส่สบาย คลุมบริเวณจมูกและปาก
ได้แนบชิดสนิท

• ฟิลเตอร์มีประสิทธิภาพในการกรองสูงช่วย
ให้หายใจสะดวก



Zoo




UFO



การเก็บรักษา : จัดเก็บในพื้นที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดด

ข้อแนะนำ : เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ

วิธีการใช้งาน

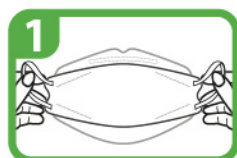

• ล้างมือให้สะอาดก่อน
แกะหน้ากากออกจากถุง
ตรวจสอบว่ามีรอยฉีก
ขาดเป็นรูหรือไม่



• คลี่หน้ากากออกให้
เป็นทรงคล่องสายที่หู
ทั้งสองข้างโดยที่สาย
รัดไม่บิด




• ปรับโครงลวดให้แนบ
กับดั้งจมูก คลี่หน้ากาก
ให้คลุมปากและคาง



• การตรวจสอบ
หายใจเข้าอย่างรวดเร็ว :
หน้ากากควรจะยุบเข้าหา
ใบหน้า
หายใจออก : ใช้มือของคุณ
ตรวจการรั่วไหลของ
อากาศรอบๆ ใบหน้า

คำเตือน :

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
- ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหายหรือรู้สึกหายใจติดขัด
- ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากกันแก๊ส)
- ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ

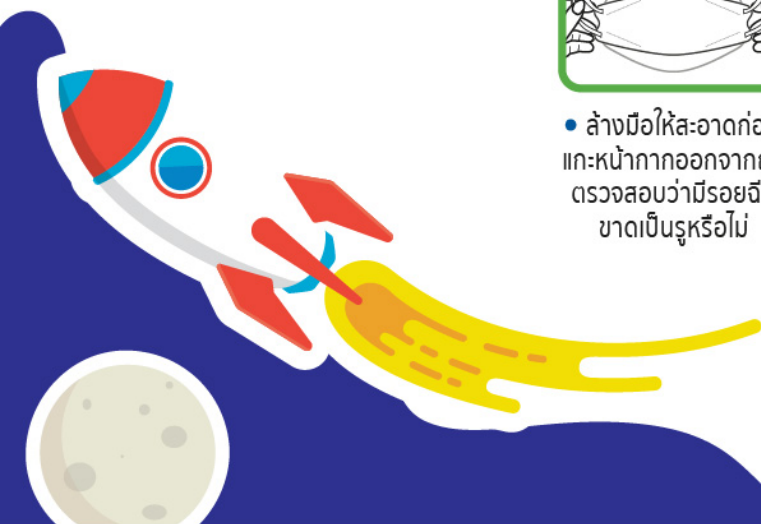



หน้ากากอนามัย

ASIAN

SIZE L

3D fit

4230

STANDARD

T/GDBX 025-2020


PM 2.5




หน้ากากอนามัยปกป้อง

4 ชั้น 4 LAYERS
FACE MASK

ประสิทธิภาพการกรอง
FILTRATION EFFICIENCY $\geq 99\%$

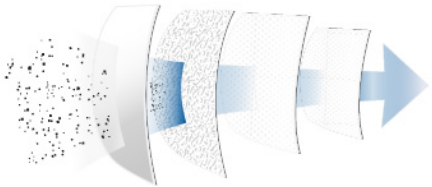

เนื้อผ้านาโนอ่อนโยน
ไม่ระคายเคืองต่อผิว
NANO FABRIC

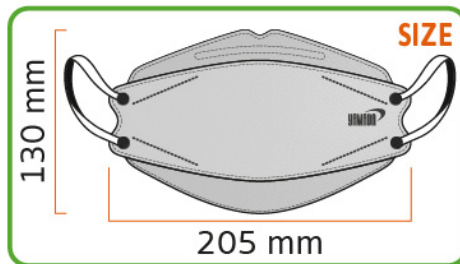

น้ำหนัก 50 g/แพ็ค

BSR 10 ชั้น/แพ็ค

200 ชั้น/ถุง, 2000 ชั้น/ลัง



- รูปทรง 3D ออกแบบให้รับกับส่วนโค้งของใบหน้า ส่วนใส่สบาย คลุมบริเวณจมูกและปากได้แนบชิดสนิท
- 3D FACE MASK DESIGNED TO FIT THE CURVES AND EDGES OF YOUR FACE. COMFORTABLE WEAR AND COMPLETELY COVERS YOUR NOSE AND MOUTH.

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
- CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.

การเก็บรักษา : จัดเก็บในพื้นที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดด
STORAGE : KEEP DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
- ไม่ควรใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
- ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากกันแก๊ส)
- ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ

คำเตือน / WARNING

- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
- SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE.
- CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.
- DO NOT USE A MASK FOR MORE THAN 1 TIME.

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE



- ล้างมือให้สะอาดก่อนแตะหน้ากากออกจากถุงตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาดเป็นรูหรือไม่



- คล้องสายที่หูทั้งสองข้าง โดยที่สายรัดไม่บิด



- ปรับโครงลวดให้แนบกับดั้งจมูก คล้องสายให้คลุมปากและคาง



- การตรวจสอบหายใจเข้าอย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้าหายใจออก : ใช้มือของคุณตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้า



หน้ากากอนามัย DISPOSABLE FACE MASK



STANDARD
T/GDBX 025-2020

PM 2.5



หน้ากากอนามัยปกป้อง

4 ชั้น 4 LAYERS
FACE MASK

ประสิทธิภาพการกรอง
FILTRATION EFFICIENCY $\geq 99\%$



น้ำหนัก 50 g/แพ็ค
บรรจุ 10 ชั้น/แพ็ค
200 ชิ้น/ถุง, 2000 ชิ้น/ลัง



เนื้อผ้านาโนอ่อนโยน
ไม่ระคายเคืองต่อผิว
NANO FABRIC


• รูปทรง 3D ออกแบบให้รับกับส่วนโค้งของใบหน้า
สวมใส่สบาย คลุมบริเวณจมูกและปากได้แนบชิดสนิท

• 3D FACE MASK DESIGNED TO FIT THE CURVES AND EDGES OF
YOUR FACE. COMFORTABLE WEAR AND COMPLETELY COVERS
YOUR NOSE AND MOUTH.

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
- CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF
AIR POLLUTION.

สี
Color

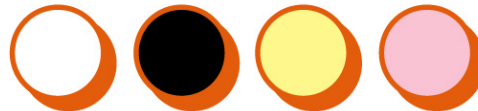

การเก็บรักษา : จัดเก็บในพื้นที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดด
STORAGE : KEEP DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับ
ปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5% • ไม่ควร
ใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- เปลี่ยนหน้ากากทันทีเมื่อชำรุดเสียหาย หรือ
รู้สึกหายใจติดขัด • ไม่สามารถใช้ป้องกัน
สารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากาก
กันแก๊ส) • ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ

คำเตือน / WARNING

- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN
PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS
THAN 19.5%. • SHOULD NOT USE IN AREA
THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN
YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT
EASY TO BREATHE. • CANNOT BE WORN TO
PREVENT TOXIC SUBSTANCES. • DO NOT
USE A MASK FOR MORE THAN 1 TIME.

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE



- ล้างมือให้สะอาดก่อนแกะ
หน้ากากออกจากถุงตรวจ
สอบว่ามีรอยฉีกขาดเป็นรู
หรือไม่



- คลี่หน้ากากออกให้เป็นทรง
คล้องสายที่หูทั้งสองข้าง โดย
ที่สายรัดไม่บิด



- ปรับโครงลวดให้แนบกับดั่ง
จมูก คลี่หน้ากากให้คลุมปาก
และคาง



- การตรวจสอบ
หายใจเข้าอย่างรวดเร็ว :
หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้า
หายใจออก : ใช้มือของคุณตรวจ
การรั่วไหลของอากาศรอบๆ
ใบหน้า





STANDARD
T/GDBX 025-2020
Certified with CNAS

หน้ากากอนามัย DISPOSABLE FACE MASK

ASIAN

3D fit



4230
PASTEL
ADULT
SIZE : 20.5x13 cm

PM 2.5

หน้ากากอนามัยปกป้อง


4 ชั้น 4 LAYERS
FACE MASK

ประสิทธิภาพการกรอง
FILTRATION EFFICIENCY $\geq 99\%$



น้ำหนัก 37 g/แพ็ค
บรรจุ 7 ชั้น/แพ็ค
140 ชั้น/ถุง, 1400 ชั้น/ลัง

PASTEL 7 ชั้น
7 สี

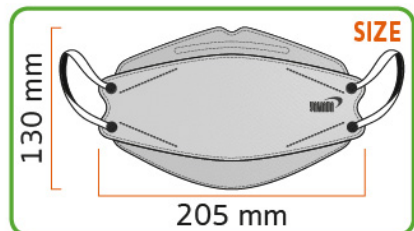

การเก็บรักษา : จัดเก็บในพื้นที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดด
STORAGE : KEEP DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5% • ไม่ควรใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด • ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากกันแก๊ส) • ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ

คำเตือน / WARNING

- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5% • SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE. • CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES. • DO NOT USE A MASK FOR MORE THAN 1 TIME.

- รูปทรง 3D ออกแบบให้รับกับส่วนโค้งของใบหน้า ส่วนใต้สabay คลุมบริเวณจมูกและปากได้แนบชิดสนิท
- 3D FACE MASK DESIGNED TO FIT THE CURVES AND EDGES OF YOUR FACE. COMFORTABLE WEAR AND COMPLETELY COVERS YOUR NOSE AND MOUTH.

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE



- ล้างมือให้สะอาดก่อนแกะหน้ากากออกจากถุงตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาดเป็นรูหรือไม่



- คล้องสายที่หูทั้งสองข้าง โดยที่สายรัดไม่บิด



- ปรับโครงลวดให้แนบกับดั้งจมูก คล้องสายให้คลุมปากและคาง



- การตรวจสอบหายใจเข้าอย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้าหายใจออก : ใช้มือของคุณตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้า

PARTICLE FILTERING HALF MASKS MEET THE REQUIREMENTS OF REGULATION (EU) 2016/425. THEY HAVE BEEN TESTED ACCORDING TO EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. MODULE B (EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATION) AND MODULE D CERTIFICATION HAVE BEEN ISSUED BY CQCS CERTIFICATION SERVICES LIMITED, BLOCK 1 BLANCHARDSTOWN CORPORATE PARK, BALLYCOOLIN ROAD, BLANCHARDSTOWN, DUBLIN15, D15 AKK1, IRELAND (NB 2834).

เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ ป้องกันฝุ่น ขนาดเล็ก

งานเจียร งานขัดสี งานบรรจุภัณฑ์ เซรามิก
เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

SUITABLE FOR PROTECTION AGAINST SMALL PARTICLES DUST.
GENERAL SWEEPING, GRINDING, SANDING, DRUG
AND FLOUR DUST, CERAMIC, MINE AND TEXTILE INDUSTRY, ETC.



ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค
ขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน $\geq 94\%$ ที่ 95L/min

XXX.-/BOX
xx Boxes/Ctn

น้ำหนัก 570g /box

คุณสมบัติ / FEATURE

- การปิดที่แนบสนิท • สายรัดแบบเชื่อมติด ปราศจากส่วนผสมน้ำยางธรรมชาติ • ปรับแถบแถบอลูมิเนียมกับสันจมูกเพื่อให้แนบสนิทมากยิ่งขึ้น • ที่รองจมูกผลิตจาก PU โฟม ไม่ทำใหระคายเคือง
- THE FLANGE EDGE WHICH COMPLETELY CONCEALS THE FACE.
- CONNECTING STRAPS, LATEX-FREE. • ADJUST THE ALUMINIUM BAND WITH THE NOSE RIDGE. FOR MORE CLOSING.
- NOSE PADS MADE FROM PU FOAM AND NOT CAUSE IRRITATION.

ข้อแนะนำ / SUGGESTION


- เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
- CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.

คำเตือน / WARNING

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
- ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหายหรือรู้สึกหายใจติดขัด
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE.
- ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากกันแก๊ส)
- CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.
- ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ
- SINGLE USE.



20
PCS

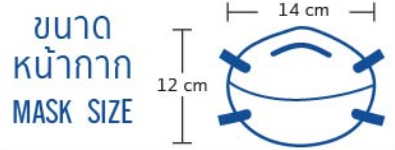

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE



- วางหน้ากากไว้ที่ปลายนิ้วมือ โดยที่แถบอลูมิเนียมควรจะอยู่ด้านบน และสายรัดจะต้องห้อยอยู่ด้านล่างของมือ
- LAY A MASK ON FINGERTIPS. ALUMINIUM STRIP SHOULD STAY ABOVE AND THE ELASTIC STRAPS SHOULD HANG BELOW A HAND.



- สวมหน้ากากให้คลุมใต้คางและจมูกจากนั้นให้ดึงสายรัดยางยึดครอบบนศีรษะและใต้ใบหู โดยที่สายรัดไม่บิด
- COVER THE MASK ON THE NOSE AND BELOW THE CHIN THEN PULL THE STRAP AROUND THE HEAD AND UNDER EARS. THE STRAP SHOULD NOT BE WRUNG.



- ปรับแถบอลูมิเนียมด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือทั้งสองข้าง ให้เข้ารูปกับสันจมูกเพื่อให้แนบสนิทกับหน้า
- ADJUST ALUMINIUM STRIP TO AN INDIVIDUAL FACIAL FIT WITH FOREFINGERS AND MIDDLEFINGERS OF BOTH HANDS TO INSURE THAT THE MASK WELL CONCEALS THE FACE.



- การตรวจสอบฟิตติ้ง
 - หายใจเข้าอย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้า
 - หายใจออก : ให้ใช้มือของคุณตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้า
- SEAL INSPECTION
 - WHEN RAPIDLY INHALING, THE MASK SHOULD FLATTEN TOWARDS THE FACE.
 - WHEN EXHALING, INSPECT AROUND THE FACE WITH YOUR PALM FOR THE OXYGEN LEAKAGE.



หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบถ่วง DISPOSABLE RESPIRATOR

5231
GREEN COLOR

CE EN 149:2001+A1:2009
2834 FFP2 NR
BLOOD RESISTANCE TESTED BY CNAS



AIRBORNE ป้องกันสารคัดหลั่ง

คุณสมบัติ / FEATURE

- หน้ากากเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ถูกออกแบบเป็นรูปทรงถ้วยที่ทนทานต่อการยุบตัว ป้องกันฝุ่น การแพร่เชื้อทางอากาศ
- ขอบหน้ากากกว้างคลุมใบหน้าได้แนบสนิท มีแถบพอยด์อยู่ด้านบนและเสริมฟองน้ำบุอยู่ด้านในเพื่อเพิ่มความกระชับและความสบายขณะสวมใส่

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE



- วางหน้ากากไว้ที่ฝ่ามือโดยหงายส่วนจมูกไว้ที่ปลายนิ้วและสายรัดจะต้องห้อยอยู่ด้านล่างของมือ



- สวมหน้ากากให้คลุมใต้คางและจมูกจากนั้นให้ดึงสายรัดอย่างยึดกรอบบนศีรษะและใต้หู



- กดแถบพอยด์ตามขอบด้านบนให้เข้ากับสันจมูก เพื่อให้หน้ากากแนบสนิทกับใบหน้า



- ตรวจสอบโดยการหายใจเข้าและออก ขณะหายใจออกให้ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้า

การเก็บรักษา : จัดเก็บในพื้นที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดด
STORAGE : KEEP DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.



ปิดมิดชิดแนบสนิทใบหน้า



ด้านในหน้ากาก INSIDE THE MASK



รุ่น	ขนาด	น้ำหนัก	บรรจุ
5231	14x12 cm	25 g	20 pcs/box, 400 pcs/ctn

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- เปลี่ยนหน้ากากทันทีเมื่อชำรุดหรือรู้สึกหายใจติดขัด
- หน้ากากเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ห้ามใช้ซ้ำ
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATH. • DO NOT REUSE.

คำเตือน / WARNING

- ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก๊าซพิษ
- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
- DO NOT USE FOR GASES OR VAPOURS.
- NOTICE THE WARNING ON THE LABEL AND ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE.



แบบชิดใบหน้า มีวาล์วหายใจสะดวก

FIT FACE, VALVE IS HELP BREATHING MORE EASILY.

กรองสารพิษจากฟumesโลหะ ควันพิษทั่วไป

METAL FUMES AND DUST FILTRATION



ทนต่อประกายไฟ
ไม่ลามไฟ

สินค้าหมด
Out of stock !!!

รุ่น (Model)	แพ็คเกจ (Pack) ชิ้น (pc)	บรรจุต่อกล่อง (Box) แพ็คเกจ (pack)	บรรจุต่อลัง (Carton) ชิ้น (pc) แพ็คเกจ (pack) กล่อง (Box)	น้ำหนัก (Weight) ต่อชิ้น (pc)	ราคา (Price) แพ็คเกจ (pack)
5241	1	20	240 240 12	15.2 g	xx.-/Pack

ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน $\geq 94\%$ ที่ 95L/min
Particle filtration at particle size 0.3 microns $\geq 94\%$ (95L/min).

คุณสมบัติ

1. ขอบหน้ากากใหญ่คลุมได้แบบชิดสนิทใบหน้า
2. แผ่นรองจมูกด้านหลังทำจาก PU ป้องกันกลิ่นสารเคมีซึมเข้าภายในหน้ากาก
3. หน้ากากผ่านระบบไฟฟ้าสถิตทำให้การหายใจง่ายและเย็นขึ้น
4. มีชั้นกรองคาร์บอน เพื่อป้องกัน กลิ่นก๊าซและไอระเหยภายใต้ค่าขีดจำกัดที่เกี่ยวข้อ
5. วาล์วหายใจขนาดใหญ่ ช่วยให้ระบายอากาศเสีย ความเปียกชื้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มความรู้สึกสบาย

เหมาะสำหรับ งานเชื่อม งานบัดกรี ป้องกันกลิ่นที่เกิดจากการตัดโลหะ ป้องกันสารพิษจากฟumesโลหะ ฝุ่นละออง ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

วิธีการใช้งาน

- วางหน้ากากไว้ที่ปลายนิ้วมือ โดยที่แถบอลูมิเนียมควรจะอยู่ด้านบนและสายรัดยางยึดจะคล้องอยู่ด้านล่างของมือ
- สวมหน้ากากให้คลุมได้ตาดและจมูก จากนั้นให้ดึงสายรัดยางยึดครอบบนศีรษะและใต้ใบหูโดยที่สายรัดไม่บิด
- ปรับแถบอลูมิเนียมด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือทั้งสองข้างให้เข้ารูปกับสันจมูก เพื่อให้แน่ใจว่าหน้ากากแนบสนิทเป็นอย่างดี
- การตรวจสอบผืน
- หายใจเข้าอย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้า
- หายใจออก : ให้ใช้มือของคุณตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้า



ข้อแนะนำ เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
Suggestion Choose the mask suitable for the concentration of air pollution.

Feature

1. Large flange edge to cover and fit your face.
2. Back nose pad made from PU foam for protect chemical odors permeate into the mask.
3. The mask through electrostatic system that breathing easily and cooler.
4. Carbon filter layer for protect odors, gas and vapors under limit.
5. Large breathing valve can help to ventilate the air pollution and humidity sharply and feel comfortable.

Suitable for Welding, Solder, Arc welding, Protect the smell from metal cutting, metal fumes, better anti-static

How to use

- Lay a mask on fingertips. A aluminium strip should stay above and the elastic straps should hang below a hand.
- Cover the mask on the nose and below the chin Then pull the strap around the head and under ears. The strap should not be wrung.
- Adjust a aluminium strip to an individual facial fit with forefingers and middlefingers of both hands to insure that the mask well conceals the face.
- Seal inspection
- **Inhale rapidly** : the mask should flatten towards the face.
- **Exhale** : inspect around the face with your palm for the oxygen leakage.



คำเตือน
WARNING

ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%

- ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50 °C
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
- ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากกันแก๊ส)
- ไม่ควรใช้หน้ากากมากกว่า 1 ครั้ง

- Do not wear the mask when you in places where oxygen content is less than 19.5%.
- Should not use in area that high temperature than 50°C.
- Change the mask immediately when you found damaged or feel not easy to breath.
- Cannot be worn to prevent toxic substances.
- Do not use a mask for more than 1 times.

หน้ากากอนามัย แบบพับ

FLAT FOLD RESPIRATOR DISPOSABLE MASK

8231
GREEN COLOR

CE EN 149:2001+A1:2009
2834 FFP2 NR

BLOOD RESISTANCE TESTED BY CNAS



L10314


AIRBORNE

ป้องกันสารคัดหลั่ง

คุณสมบัติ / FEATURE

- ขอบหน้าแปลนแบบชิดใบหน้า
- เสริมฟองน้ำบุอยู่ด้านใน เพื่อเพิ่มความกระชับ และความสบายขณะสวมใส่ ช่วยลดช่องว่างป้องกันการรั่วไหล
- ดักจับฝุ่นด้วยกระบวนการไฟฟ้าสถิต
- THE FLANGE EDGE WHICH CONCEALS THE FACE.
- REINFORCED SPONGE INSIDE FOR INCREASE TIGHTNESS AND COMFORTABLE WHILE WEARING, FIXES THE SIDES OF THE EASILY DETACHABLE NOSE WINGS.
- FILTER LAYER ELECTROSTATIC ADSORPTION TECHNOLOGY.

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE



- ล้างมือให้สะอาดก่อนแกะหน้ากากออกจากถุงตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาดเป็นรูหรือไม่



- คล้องหน้ากากออกให้ป็นทรงกรวยคล้องสายที่หูทั้งสองข้าง โดยที่สายรัดไม่บิด



- ปรับโครงเหล็กให้แนบกับดั้งจมูก คลัสหน้ากากให้คลุมปากและคาง



- การตรวจสอบหน้ากาก
หายใจเข้าอย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้า
หายใจออก : ให้ใช้มือของคุณตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้า

การเก็บรักษา / STORAGE

 จัดเก็บในพื้นที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดด
KEEP DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.

SGS

Suzhou Porkeange Nano Science and Technology Co., Ltd



รุ่น	ขนาด	น้ำหนัก	แพ็ค
8231 (M)	16x14.5 cm	4.2 g	1 ชิ้น
8231 (L)	17x15.5 cm	4.5 g	1 ชิ้น

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- เปลี่ยนหน้ากากทันทีเมื่อชำรุดหรือรู้สึกหายใจติดขัด
- หน้ากากเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ห้ามใช้ซ้ำ
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATH.
- DO NOT REUSE.



คำเตือน / WARNING

- ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก๊าซพิษ
- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
- DO NOT USE FOR GASES OR VAPOURS.
- NOTICE THE WARNING ON THE LABEL AND ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE.



หน้ากาก PM 2.5

ANTI PARTICAL FOLDING RESPIRATOR

8230
WHITE COLOR
SIZE L

KN95

GB 2626-2019

Certified with CNAS

ป้องกันฝุ่นและเกสรดอกไม้
PROTECT PARTICLE AND POLLEN.



PARTICLE



POLLEN

คุณสมบัติ / FEATURES

- ขอบหน้าแปลนขนาดใหญ่คลุมได้แนบชิดสนิทใบหน้า
- แผ่นรองจมูกด้านในทำจาก Sponge เพื่อให้สวมใส่สบาย และกระชับ ช่วยลดช่องว่างป้องกันการรั่วไหล
- ดักจับฝุ่นด้วยกระบวนการไฟฟ้าสถิต ทำให้กรองฝุ่นได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- LARGE FLANGE EDGE TO COVER AND FIT YOUR FACE.
- NOSE PAD MADE FROM SPONGE FOR MAKE NOSE FITTING MORE COMFORTABLE AND BETTER FITTING, LESS LEAKAGE ON NOSE.
- TRAP PARTICLE WITH ELECTRICITY METHOD THAT HIGH EFFICIENCY FILTRATION.

การเก็บรักษา : จัดเก็บในพื้นที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดด
STORAGE : KEEP DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.

ข้อแนะนำ SUGGESTION

- เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
- CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.

คำเตือน / WARNING

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
- ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
- ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากแก๊ส)
- ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ

- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
- SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATHE.
- CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.
- DO NOT REUSE.



BACK



รุ่น (MODEL)	ขนาด (SIZE)	น้ำหนัก (NET WEIGHT)	จำนวนบรรจุ (PACKING)
8230	L (17x15.5 cm)	5.5 g/pc	1 pc/pack, 20 pcs/box, 240 pcs/ctn

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE



- ล้างมือให้สะอาดก่อนแกะหน้ากากออกจากถุงตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาดเป็นรูหรือไม่
- WASH YOUR HANDS AND REMOVE THE MASK FROM PLASTIC BAG AND CHECKING FOR TEAR OR HOLE.



- คลี่หน้ากากออกให้เป็นทรงกรวย คล้องสายที่หูทั้งสองข้างโดยที่สายรัดไม่บิด
- UNFOLD THE MASK INTO A CONE SHAPE AND WEARING YOUR BOTH EARLOOP. THE STRAP SHOULD NOT BE WRUNG.



- ปรับโครงเหล็กให้แนบกับดั้งจมูกคลี่หน้ากากให้คลุมปากและคาง
- ADJUST STEEL WIRE TO FIT YOUR NOSE. UNFOLD THE MASK TO COVER MOUTH AND CHIN.



- การตรวจสอบผนึก
หายใจเข้าอย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้า
หายใจออก : ให้ใช้มือของคุณตรวจการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้า
- SEAL INSPECTION WHEN RAPIDLY INHALING, THE MASK SHOULD FLATTEN TOWARDS THE FACE. WHEN EXHALING, INSPECT AROUND THE FACE WITH YOUR PALM FOR THE OXYGEN LEAKAGE.



หน้ากากคาร์บอน PM 2.5

ANTI PARTICAL CARBON FOLDING RESPIRATOR

8240
GRAY COLOR

KN95
GB 2626-2019
Certified with CNAS

ป้องกันฝุ่น คว้น กลิ่น
PROTECT PARTICLE SMOKE AND ODORS.



PARTICLE



SMOKE



ODORS

คุณสมบัติ / FEATURES

- ขอบหน้าแปลนขนาดใหญ่คลุมได้แนบชิดสนิทใบหน้า
- แผ่นรองจมูกด้านในทำจาก Sponge เพื่อให้สวมใส่สบาย และกระชับ ช่วยลดช่องว่างป้องกันการรั่วไหล
- ดักจับฝุ่น ด้วยกระบวนการไฟฟ้าสถิต ทำให้กรองฝุ่นได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มีชั้นกรองคาร์บอน เพื่อป้องกันกลิ่นก๊าซและไอระเหยภายใต้ค่าขีดจำกัดที่เกี่ยวข้อง

- LARGE FLANGE EDGE TO COVER AND FIT YOUR FACE.
- NOSE PAD MADE FROM SPONGE FOR MAKE NOSE FITTING MORE COMFORTABLE AND BETTER FITTING, LESS LEAKAGE ON NOSE.
- TRAP PARTICLE WITH ELECTRICITY METHOD THAT HIGH EFFICIENCY FILTRATION.
- CARBON FILTER LAYER FOR PROTECT ODORS, GAS AND VAPORS UNDER LIMIT.

การเก็บรักษา : จัดเก็บในพื้นที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดด
STORAGE : KEEP DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.

ข้อแนะนำ SUGGESTION

- เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
- CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.

คำเตือน / WARNING

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5% • ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
- ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากแก๊ส) • ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ

- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
- SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATH.
- CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.
- DO NOT REUSE.



M (16x14.5 cm)

L (17x15.5 cm)



BACK



รุ่น (MODEL)	ขนาด (SIZE)	น้ำหนัก (NET WEIGHT)	จำนวนบรรจุ (PACKING)
8240	M (16x14.5 cm)	10.0 g/pc	1 pc/pack, 20 pcs/box, 240 pcs/ctn
8240	L (17x15.5 cm)	10.2 g/pc	1 pc/pack, 20 pcs/box, 240 pcs/ctn

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE



- ล้างมือให้สะอาดก่อนแกะหน้ากากออกจากถุงตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาดเป็นรูหรือไม่
- WASH YOUR HANDS AND REMOVE THE MASK FROM PLASTIC BAG AND CHECKING FOR TEAR OR HOLE.



- คลี่หน้ากากออกให้เป็นทรงกรวย คล้องสายที่หูทั้งสองข้างโดยที่สายรัดไม่บิด
- UNFOLD THE MASK INTO A CONE SHAPE AND WEARING YOUR BOTH EARLOOP. THE STRAP SHOULD NOT BE WRUNG.



- ปรับโครงเหล็กให้แนบกับดั้งจมูกคลี่หน้ากากให้คลุมปากและคาง
- ADJUST STEEL WIRE TO FIT YOUR NOSE. UNFOLD THE MASK TO COVER MOUTH AND CHIN.



- การตรวจสอบผนึก
หายใจเข้าอย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้า
หายใจออก : ให้ใช้มือของคุณตรวจการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้า
- SEAL INSPECTION WHEN RAPIDLY INHALING, THE MASK SHOULD FLATTEN TOWARDS THE FACE. WHEN EXHALING, INSPECT AROUND THE FACE WITH YOUR PALM FOR THE OXYGEN LEAKAGE.



หน้ากากคาร์บอน PM 2.5 วาล์วคู่

ANTI PARTICAL FOLDING RESPIRATOR WITH EXHALATION DOUBLE VALVE

8242
GRAY COLOR
SIZE L

KN95
GB 2626-2019
Certified with CNAS

ป้องกันฝุ่น คว้น กลิ่น

PROTECT PARTICLE SMOKE AND ODORS.



PARTICLE



SMOKE



ODORS

คุณสมบัติ / FEATURES

- ขอบหน้าแปลนขนาดใหญ่คลุมได้แนบชิดสนิทใบหน้า
- แผ่นรองจมูกด้านในทำจาก Sponge เพื่อให้สวมใส่สบายและกระชับ ช่วยลดช่องว่างป้องกันการรั่วไหล
- ดักจับฝุ่นด้วยกระบวนการไฟฟ้าสถิต ทำให้กรองฝุ่นได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มีชั้นกรองคาร์บอน เพื่อป้องกันกลิ่นก๊าซและโอโระเหยงายได้ค่าขีดจำกัดที่เกี่ยวข้อง
- วาล์วหายใจขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนและช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น

- LARGE FLANGE EDGE TO COVER AND FIT YOUR FACE.
- NOSE PAD MADE FROM SPONGE FOR MAKE NOSE FITTING MORE COMFORTABLE AND BETTER FITTING, LESS LEAKAGE ON NOSE.
- TRAP PARTICLE WITH ELECTRICITY METHOD THAT HIGH EFFICIENCY FILTRATION.
- CARBON FILTER LAYER FOR PROTECT ODORS, GAS AND VAPORS UNDER LIMIT.
- LARGE VALVE CAN HELP TO VENTILATE THE HOT AIR AND FEEL COMFORTABLE TO BREATHING.

การเก็บรักษา : จัดเก็บในพื้นที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดด
STORAGE : KEEP DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.

ข้อแนะนำ SUGGESTION

- เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของมลพิษ
- CHOOSE THE MASK SUITABLE FOR THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTION.

คำเตือน / WARNING

- ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
- ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C
- เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
- ไม่สามารถป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากแก๊ส)
- ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ

- DO NOT WEAR THE MASK WHEN YOU IN PLACES WHERE OXYGEN CONTENT IS LESS THAN 19.5%.
- SHOULD NOT USE IN AREA THAT HIGH TEMPERATURE THAN 50°C.
- CHANGE THE MASK IMMEDIATELY WHEN YOU FOUND DAMAGED OR FEEL NOT EASY TO BREATH.
- CANNOT BE WORN TO PREVENT TOXIC SUBSTANCES.
- DO NOT REUSE.



BACK



รุ่น (MODEL)	ขนาด (SIZE)	น้ำหนัก (NET WEIGHT)	จำนวนบรรจุ (PACKING)
8242	L (17x15.5 cm)	18.9 g/pc	1 pc/pack, 20 pcs/box, 240 pcs/box

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE



- ล้างมือให้สะอาดก่อนแกะหน้ากากออกจากถุงตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาดเป็นรูหรือไม่
- WASH YOUR HANDS AND REMOVE THE MASK FROM PLASTIC BAG AND CHECKING FOR TEAR OR HOLE.



- คลี่หน้ากากออกให้เป็นทรงกรวย คล้องสายที่หูทั้งสองข้างโดยที่สายรัดไม่บิด
- UNFOLD THE MASK INTO A CONE SHAPE AND WEARING YOUR BOTH EARLOOP. THE STRAP SHOULD NOT BE WRUNG.



- ปรับโครงเหล็กให้แนบกับดั้งจมูกคลี่หน้ากากให้คลุมปากและคาง
- ADJUST STEEL WIRE TO FIT YOUR NOSE. UNFOLD THE MASK TO COVER MOUTH AND CHIN.



- การตรวจสอบผนึก
หายใจเข้าอย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้า
หายใจออก : ให้ใช้มือของคุณตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้า
- SEAL INSPECTION WHEN RAPIDLY INHALING, THE MASK SHOULD FLATTEN TOWARDS THE FACE. WHEN EXHALING, INSPECT AROUND THE FACE WITH YOUR PALM FOR THE OXYGEN LEAKAGE.



• ผ้าปิดจมูกแบบ กลาง มีชั้นใน 2 ชั้น • ใช้กรองฝุ่น

โมเดล Model	ชั้นใน	บรรจุ Pcs/Dozen	ราคา/โหล Price/Dozen
2L สีดำ ●	2 ชั้น	12 ชิ้น/1 โหล	XX.-
2L สีขาว ○	2 ชั้น	12 ชิ้น/1 โหล	XX.-
▶ 3L สีขาว ○	3 ชั้น	12 ชิ้น/1 โหล	XX.-

▶ สินค้ากำลังจะเข้า