



# ซิลิโคนอุดหู

## Soft Silicone Earplugs

Model.  
EC2016

1 คู่  
Pair

With carry case

CE EN 352-2:2002  
ANSI S3.19-1974

# แบบนุ่มพร้อมกล่องพกพา



# SNR 28dB

เหมาะสำหรับ ใช้อุดหู เพื่อลดเสียงรบกวน  
เวลานอน ใช้ในกิจกรรมที่ต้องการสมาธิ  
หรือป้องกันน้ำเข้าหูในขณะว่ายน้ำ

They are ideal for use when sleeping,  
working, travelling or swimming.



40 ชิ้น/กล่อง

8 กล่อง/ลัง

Price/คู่

75.-

### คุณสมบัติ / FEATURES

ซิลิโคน แบบนุ่ม ปรับได้ตามสรีระของหูกันน้ำ  
และกันเสียงรบกวนได้ 28dB (SNR) ใช้ซ้ำได้  
หลายครั้ง หรือจนกว่าจะหายเหนียว

Super soft silicone, mouldable, waterproof and high  
noise-reduction ability up to 28dB (SNR) Can be  
used for multiple times or no longer sticky.

### ข้อแนะนำ / SUGGESTION

เหมาะสำหรับ ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุมากกว่า  
3 ปีขึ้นไป เปลี่ยนซิลิโคนใหม่ทันทีเมื่อสกปรก  
Suitable for adults and children over the age of 3.  
Please replace them timely if they get dirty.

### คำเตือน / WARNING

ห้ามดันซิลิโคนเข้าไปลึกในรูหู เพราะจะทำให้  
ถอดออกยาก ใช้สำหรับอุดหูชั้นนอกเท่านั้น  
Do not insert or push into the ear canal as it may  
be difficult to remove. Cover ear opening only.

### วิธีการใช้งาน / HOW TO USE

ล้างมือและเช็ดทำความสะอาดรูหูให้สะอาดแล้วปล่อยให้แห้ง  
Wash and dry your hands before use and ensure area  
around ear opening is clean and dry.



- ปั้นซิลิโคนให้เป็นรูปวงกลมหรือวงรี
- Shape the whole earplug into a ball or cylinder.



- ใช้นิ้วมือดันซิลิโคนเข้าไปในรูหู
- Push into the external ear canal.



- ค่อยๆกลิ้งซิลิโคนให้ปิดรูหูให้สนิท
- Roll the earplugs slowly to fill the outer ear.

### การเก็บรักษา / HOW TO STORAGE

- ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่ และปล่อยให้แห้ง
- เก็บซิลิโคนในกล่อง ปิดฝาให้สนิทและหลีกเลี่ยงแสงแดด
- Use water or soapy water, gently rinse then leave to dry naturally.
- Keep silicones in the box, the lid tightly closed and avoid direct sunlight.